

X3 Wi-Fi otoszkóp fűltisztításhoz

Felhasználói kézikönyv

Csatlakozás mobiltelefonhoz

1. lépés: Töltse le a Suear alkalmazást

iOS: Keresse meg és töltse le az alkalmazást az Apple Store-ból. Android: Keresse és töltse le az alkalmazást a Google Play áruházból. Alternatívaként szkennelje be, keresse meg és töltse le az alkalmazást az alábbi QR-kódról.



Kompatibilitás

Android 4.4, iOS 9.0 és újabb. Android telefonok: Samsung S7, Galaxy S6 edge, Note 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel XL, Pixel 3, Nexus 6P, Huawei Mate 9, Mate 10, Mate 20 Pro, OnePlus stb. iOS telefonok: iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR stb.

Megjegyzés: a készülék nem kompatibilis a számítógépes rendszerrel/számítógéppel.

2. lépés: Csatlakozás

1. Nyomja meg a be/ki gombot 5 másodpercig, és kapcsolja be a készüléket.



2. Nyissa meg a Suear alkalmazást, majd nyomja meg a go to connect ikont. Kövesse az utasításokat a készülék csatlakoztatásához. Ezután lépjen a Wi-Fi kapcsolat beállításaihoz.



3. Keresse meg a "Suear-XXXXXX" nevet a Wi-Fi beállítások között, és csatlakoztassa a készüléket.




4. Amikor a telefon kijelzője azt mutatja, hogy a készülék csatlakoztatva van, lépjen be az alkalmazásba, és kattintson a "Home/Haza" ikonra.



A csatlakozást követően üzenetek jelennek meg:

iOS: A "Suear" helyi hálózati kapcsolatot igényel - erősítse meg.

Android: Ha a következő üzeneteket kapja - nincs adatkapcsolat (üzenet a csatlakozási kísérlet folytatásáról, a kapcsolat fenntartásáról, Wi-Fi váltásról). Nyomja meg: a kapcsolat fenntartása/kapcsolat fenntartása/elutasítása opciót.

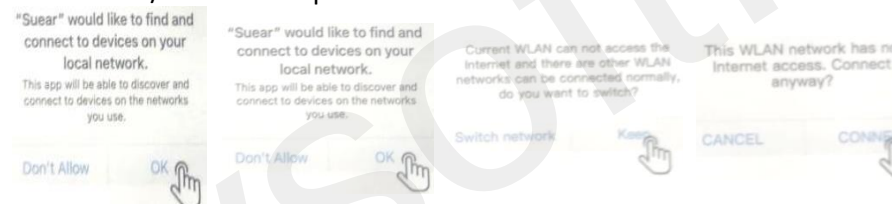

iOS

Android

Android

Android

Leírás

1. A kapcsolat állapota
2. Menü
3. Használja a bevezető videót
4. Becsült idő
5. Az akkumulátor állapota
6. Lépjen be a vizuális felületre

1 2



3
4
5
6

1. Vissza a főoldalra
2. Váltás tájkép/portré között
3. Zár/feloldás
4. Teljesítményállapot
5. Váltás az objektív üzemmódok között
6. Finder
7. Váltás a fényképek/videók között
8. Fotóalbum
9. Fénykép rögzítése/videó feltöltése
10. Bal/jobbs fülváltás

1 2 3 4



10 9

5
6
7
8

Tartozékok



Rögzítse a
fémbetétet
elforgatással



A szilikon rögzítés
cserélhető, egyszerűen
csúsztható be és ki



6x cserélhető szilikon
tartozék különböző
formákkal

Értesítés

1. Az endoszkópot a fülzsír eltávolítására és a dobhártya állapotának vizsgálatára használják. Ne használja az eszközt más célra. A gyártó/eladó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy személyi sérülésért.
2. Használat előtt/után törölje át alkohollal.
3. A fülbe való behelyezéskor legyen óvatos (lassan és óvatosan helyezze be). Ellenkező esetben fennáll a halláskárosodás veszélye. Használat közben üljön nyugodtan. Ne mozgassa a fejét hevesen. Ne vezesse be az endoszkópot túl mélyen a hallójáratba. A készülék nem helyettesíti az egészségügyi szakembert. Fülfájás, hallásproblémák vagy egyéb nehézségek esetén azonnal forduljon orvoshoz/orvoshoz.
4. Gyermekektől elzárva tartandó. A készülék nem játék.
5. Az endoszkópot csak olyan felnőttek használhatják, akik alaposan elolvasták a használati útmutatót. Használat közben kerülje az érintkezést más személlyel.
6. Az endoszkópot csak szobahőmérsékleten használja. Ne tegye ki/használja a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, poros környezetnek és magas páratartalomnak. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.
7. Ha a készülék bármilyen rendellenességet mutat, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye. Kérjük, forduljon a szervizhez/kereskedőhöz.
8. Ne tegye a készüléket vízbe vagy más maró hatású folyadékba. Törölje le

csak száraz vagy nedves ruhával (szárazra törölje).

9. Töltse fel a készüléket a hálózati adapter segítségével. Használja a mellékelt USB

Kábel. Töltés közben a LED-kijelző pirosan világít.

10. Ne szedje szét a készüléket és ne babrálja meg. Ne dobja a készüléket tűzbe. Ellenkező esetben fennáll a berendezés károsodásának vagy tűzveszélynek a veszélye.

Hibaelhárítás

A probléma	Megoldás
Nem lehet fényképet/videót menteni a mobilra	Engedélyezze az alkalmazás számára a médiához való hozzáférést
A készülék nem válaszol	Töltse fel a készüléket
Az alkalmazás nem működik	Törölje az alkalmazást, töltse le és telepítse újra.
Valós idejű felvétel nem érhető el	1. Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik a telefonhoz. 2. WLAN nem engedélyezi a csatlakozást? Engedélyezze a WLAN-t. Ha az első alkalommal a CANCEL értéket adta meg, távolítsa el az eredeti kapcsolatot, és keresse meg újra az eszközt és a kapcsolatot. 3. Engedélyezze a WLAN vagy a WLAN és a mobiladatok használatát a telefon beállításaiában. 4. Kapcsolja ki és újra be a mobiladatokat.
A készülék pirosan világít	Töltse fel a készüléket
Wi-Fi kapcsolat megszakítása	Indítsa újra a készüléket, nyissa meg az alkalmazást, és csatlakoztassa újra a készüléket a Wi-Fi-hoz.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz