

INSKAM FIND 2 PRO WIFI OTOSZKÓP ELLENŐRZÉSÉRE ÉS FÜLTISZTÍTÁS




Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Leírás

1. Szilikon rögzítés
2. A kiterjesztés fém része
3. Kamera objektív

4. Be/Ki gomb
5. C típusú töltőport

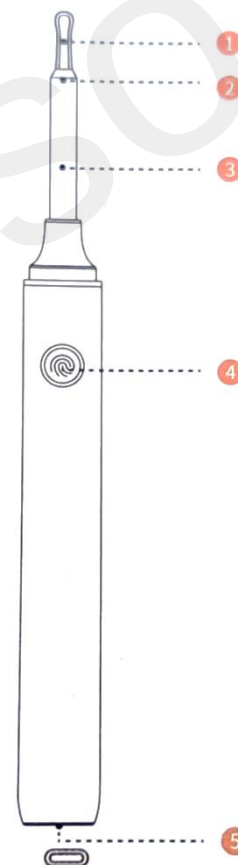

Értesítés

1. Ne használja a készüléket, ha fülgyulladás van, vagy ha egyéb fülproblémával (sérült vagy sérült dobhártya, a hallójárat kipirosodása stb.) kezelik. Használatához konzultáljon fülgyógyászával.
2. Sem a gyártó, sem a szállító nem felelős a fül belső részének sérüléséért vagy károsodásáért. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülék használatakor mindig konzultáljon fülorvosával.
3. Töltse le az alkalmazást. Használja az alkalmazást a fülzsír jobb megjelenítéséhez és eltávolításához. Tartsa a bőrfelszerelést jó távol a dobhártyától. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
4. Ne helyezze a fülhallgatót túl mélyen a hallócsőbe. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.
5. Ha a fülzsír eltávolítása nem könnyű, és a fülzsír túl vastag, csepegtessen fülcseppet a fülbe. Hagyja a cseppeket néhány napig, majd próbálja meg újra eltávolítani a fülzsírt. Ne próbálja meg mindenáron eltávolítani a fülzsírt a hallójáratból. Ellenkező esetben fennáll a hallójárat sérülésének veszélye.
6. Ha túl sok fülzsír van a fülben, jobb, ha fokozatosan távolítja el. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy a hallójárat kipirosodásának veszélye.
7. A faggyú eltávolítása után rendszeresen használja a készüléket, hogy elkerülje a fülzsír további felhalmozódását.
8. Minden használat után fertőtlenítse a fül tartozékait alkohollal. Tisztítsa meg a fényképezőgép lencsét alkohollal és vattapamaccsal. Védje a készülék testét és egyéb részeit a víztől.
9. Ne használja a készüléket töltés közben. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
10. A készülék nem játék. Óvja a készüléket a gyermekektől. Gyermekek nem használhatják a készüléket.

1. Alkalmazás

Töltse le és telepítse a Soulear alkalmazást a Google Play Store-ból (Android) vagy az Apple Store-ból (iOS).

Kompatibilitás

Android: 4.4, iOS: 9.0 vagy újabb verzió

Android mobiltelefonokon: Samsung S7, Galaxy S6 Edge, Note 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel, XL, Pixel 3, Nexus 6P, Huawei Mate9, Mate 10, Mate 20, OnePlus, stb.

iOS mobilon: iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR stb.

2.


Nyomja meg hosszan a be/ki gombot 5 másodpercig, és kapcsolja be/ki a készüléket. Bekapcsoláskor a kék LED világít.

3.

Nyissa meg az alkalmazást, és nyomja meg a "Connect Device" (Eszköz csatlakoztatása) gombot. Ezután kövesse a felületen megjelenő utasításokat. Ezután lépjen a wifi beállításokhoz.

4.

Keresse meg a Soulear-xxxx-t a wifi beállítások között, és hozza létre a kapcsolatot.

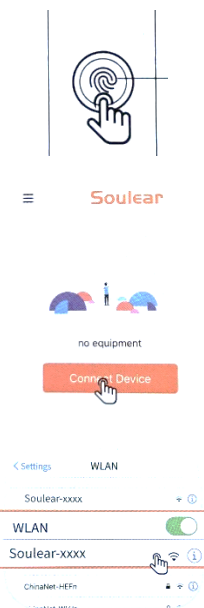

5.

A csatlakoztatás után lépjen be az alkalmazásba, hozza létre a kapcsolatot, és lépjen be a készülék felületére.

A csatlakozás után üzenetek jelennek meg

iOS: "Szeretné megtalálni és csatlakozni a helyi hálózaton lévő eszközökhöz. Nyomja meg az OK gombot.



Android: ha a következő üzenetek jelennek meg. Keep-Connect-Decline opció.


Fülhosszabbítás

5 különböző formájú szilikon tartozék.



Típusok

1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fülcsatlakozó megfelelően rögzítve van a készülék testéhez, és nem lehet könnyen eltávolítani. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a készülék használata közben eltávolítható.

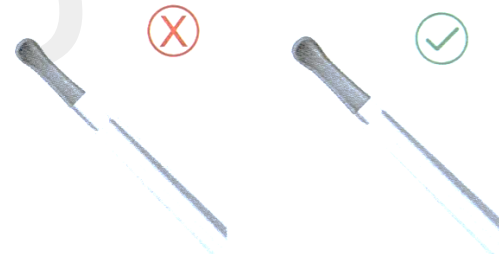

2. Az első használat során legyen nagyon óvatos. Először fokozatosan szoktassa hozzá a készüléket a hallójáratban. Ezután csak az alkalmazást használja a monitorozáshoz.
3. Használat előtt tisztítsa meg a tartozékot alkohollal. Használjon alkoholt vattapamaccsal a kameraszondán. Válassza ki a kívánt tartozékot.

Hibaelhárítás

A probléma	Megoldás
A fényképek/videók nem menthetők	Engedélyezze a fényképek, videók és fájlok tárolását a telefonon.
A kamera nem reagál	Töltse fel a készüléket.
Az alkalmazás összeomlott	Távolítsa el az alkalmazást, és telepítse újra.
Az élő kép nem látható az alkalmazás bekapcsolása után	1. Győződjön meg róla, hogy a Soulear-xxxx wifi azonosítóhoz kapcsolódik. 2. Ez a Wlan-hálózat nem rendelkezik internet-hozzáféréssel. Csatlakozzon. Ha a Cancel (Mégsem) lehetőséget választja, el kell felejtene a wifi eszközt, majd újra csatlakoztatnia kell. Lépjen be a telefon beállításába, engedélyezze az alkalmazás hozzáférését a WLAN-hoz vagy a WLAN és a mobiladatokhoz. Kapcsolja be, majd ki a mobiltelefon-adatokat.
A LED piros	Töltse fel a készüléket.
A Wifi kapcsolat megghiúsult	Indítsa újra a készüléket, nyissa meg az alkalmazást, és hozzon létre wifi-kapcsolatot.
iOS: Nem lehet csatlakozni ehhez a wifi-hálózathoz, a hálózat átmenetileg nem elérhető, kérjük, próbálja újra.	Kapcsolja ki a készüléket, majd körülbelül 30 másodperc múlva kapcsolja be újra, és létesítsen ismét wifi-kapcsolatot. Ezután használja a készüléket.
Android: A hálózati hozzáférés teljes.	Kapcsolja ki a készüléket, majd körülbelül 30 másodperc múlva kapcsolja be újra, és létesítsen ismét wifi-kapcsolatot. Ezután használja a készüléket.
A be/kikapcsolt LED jelzőfény pirosan világít	Töltse fel a készüléket.
Ha a fenti megoldások nem vezetnek eredményre, forduljon a szervizhez.	

Műszaki adatok

Név: Fűtisztító kamerával

Hálózat: IEEE 802.11b/g/n

Bitsebesség: 30 fps

Üzemi hőmérséklet: 10-50 °C

Az akkumulátor élettartama: 5 V = 0,4 A

Teljesítmény: 0,75 W

Legjobb gyújtótávolság: 1,5 - 2 cm

Működési frekvencia: 2,4 GHz

Képzékelő: CMOS

Akkumulátor kapacitás: 240 mAh

Töltési idő: 1,5 óra

Működési feszültség: 3,7 - 4,2 V

Lencse átmérő: 4,0 mm

Pixelek: 5 MP

Töltőport: USB2.0

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz