

**RENPHO** elhasználói  
kézikönyv

# Lábmasszírozó hővel



Modell: RP-ALM079H

Köszönjük, hogy a RENPHO hővel ellátott lábmasszírozót választotta. Ez a masszírozó a teljes láb, beleértve a lábfejeket, a vádlit és a combokat is, masszírozására szolgál. A biztonság és a véletlen sérülések elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és csak a megadott módon használja a terméket. A használati utasítás be nem tartása súlyos sérüléseket, halált és/vagy súlyos anyagi kárt okozhat.

## Fontos biztonsági utasítások

A készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

**HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.**

1. Ez a készülék nem alkalmas csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról.
2. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
3. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
4. A készülék kizárólag háztartási használatra készült, nem orvosi célra. Nem szabad betegségek vagy rendellenes fizikai állapotok kezelésére vagy enyhítésére használni.

**VESZÉLY – Az áramütés és a tűz kockázatának csökkentése érdekében:**

1. Soha ne használjon tűket vagy más fém rögzítőket ehhez a készülékhez.
2. Győződjön meg arról, hogy az áramkör elektromos feszültsége és frekvenciája megfelel az adapteren feltüntetett értékeknek.
3. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben.
4. Minden használat után húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
5. Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a hálózati adaptert vagy a levegőtömlőt nedves kézzel.
6. Tartsa távol a készüléket és a vezetéket a forró felületektől.
7. A készülék fűtési funkcióval rendelkezik. A hőre érzéketlen/érzékeny személyek használat közben kapcsolják ki a hőmérsékletet.

**FIGYELMEZTETÉS - A tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:**

1. Ha az alábbi felhasználói csoportok bármelyikébe tartozik, használat előtt konzultáljon orvosával:
  - Várandós vagy fekvő nők
  - Gyermekek
  - Idősek (65 év felett)
  - Bőrfertőzésekkel, érzékenységgel, bőrpírral, sebekkel és/vagy égési sérülésekkel küzdő személyek
  - Pacemakert vagy más beültetett orvostechnikai eszközt használó személyek
  - Szívbetegségben, rosszindulatú daganatban vagy más súlyos egészségügyi állapotban szenvedők
  - Orvosi kezelésben részesülő vagy masszázs közben kellemetlen érzést érző személyek
  - Csontritkulásban, cukorbetegségben vagy trombózisban szenvedők
  - Magas vagy kóros vérnyomású személyek
  - Olyan érzékszervi károsodásban szenvedő személyek, akik csökkentik a fájdalom vagy hőérzet érzékelését (pl. anyagcserezavar)
  - 100,4°F feletti lázzal küzdők
2. Hagyja abba a használatát, ha használat után rendellenesnek vagy rosszul érzi magát, és forduljon orvoshoz.
3. NE használjon a RENPHO által nem jóváhagyott alkatrészeket.

4. Szakképzett javítóműhelyben dolgozók nem szedhetik szét és nem cserélhetik ki a készüléket a gyártó engedélye nélkül.
5. NE használja a készüléket, ha a csomagolófelületek vagy a tápkábel sérült.
6. NE használja vagy tárolja a készüléket párás helyen, például fürdőszobában vagy magas hőmérsékletű helyeken.
7. NE hordozza a készüléket a tápkábelnél vagy a kézi vezérlőnél fogva.
8. NE használja alvás, gépek kezelése vagy alkoholfogyasztás után.
9. NE álljon vagy járkaljon a készülék használata közben.
10. NE tegye ki víznek a kézi vezérlőt, a burkolatokat vagy a hálózati adaptert, mert ez meghibásodást vagy áramütést okozhat.
11. NE karcolja meg, NE hajlítsa meg, NE húzza meg és NE csavarja meg túlzottan a hálózati adapter vezetékét.
12. NE helyezzen nehéz tárgyakat a részbe, és NE helyezzen idegen tárgyakat a részbe (ez tüzet és áramütést okozhat).
13. NE használjon éles eszközöket a csomagolás megkarcolására vagy kilyukasztására, mert ez légszivárgást okozhat a készülékben.
14. NE használja a borogatást közvetlenül duzzadt, gyulladt területeken, érzékeny bőrön vagy bőrkiütéseken.
15. NE használja a készüléket 20 percnél tovább egyhuzamban. A túlzott használat a készülék túlzott felmelegedéséhez és élettartamának lerövidüléséhez vezethet.
16. NE használja takaró vagy párna alatt. Túlmelegedés léphet fel, ami tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
17. NE használja a készüléket háziállatokon vagy állatokon.
18. Óvatosan használja a forró felületeket. Súlyos égési sérüléseket okozhat. A hő felügyelet nélküli használata gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek által veszélyes lehet.
19. A hőmérséklet a vezérlés beállításától függetlenül égési sérüléseket okozhat. Ne használja csecsemőn, betegen, alvó vagy eszméletlen személyen. Ne használja érzéketlen bőrön vagy rossz vérkeringésű személyen. Gyakran ellenőrizze a készülék melegített területével érintkező bőrt a hólyagosodás kockázatának csökkentése érdekében.
20. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően, a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.
21. Soha ne ejtsen vagy helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba.
22. A készüléket csak a készülékhez mellékelt hálózati adapterrel szabad használni.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

# A lábmasszírozó használata hővel

## 1. Használat előtt

- 1.1** A kendők viselésekor ügyeljen arra, hogy a megfelelő kendőket a megfelelő lábon viselje: bal és jobb.



**„L” a bal lábnak, „R” a jobb lábnak**

1.2 Keresd meg a combszorítókon a jelölést, láthatod, melyik oldal van felfelé.



1.3 Amikor combszorítót kell használnia, győződjön meg arról, hogy a comb- és vádlszorítók össze vannak kötve a levegőtömlővel. A levegőtömlőnek biztonságosan kell rögzítenie. Lásd az alábbi képet.

1.4 Győződjön meg arról, hogy a tömlő biztonságosan van rögzítve, az alábbiak szerint a vezérlőhöz tartozó bepattintható csatlakozásra irányítva.


1.5 Ha úgy érzed, hogy a masszázs túl erős, vagy kevésbé intenzívre vágysz, kérlek, kövesd az alábbi ajánlásokat:

- Válassza a legalacsonyabb intenzitást
  - Lazítsa meg a megfelelő rész tépőzáras pántját.
  - Javasoljuk, hogy a masszírozó és a vádli között hagyjon elegendő helyet, hogy 4 ujj elférjen.
- Kérjük, tekintse meg az alábbi képet.



1.31.41.5

## 2. Használati utasítás

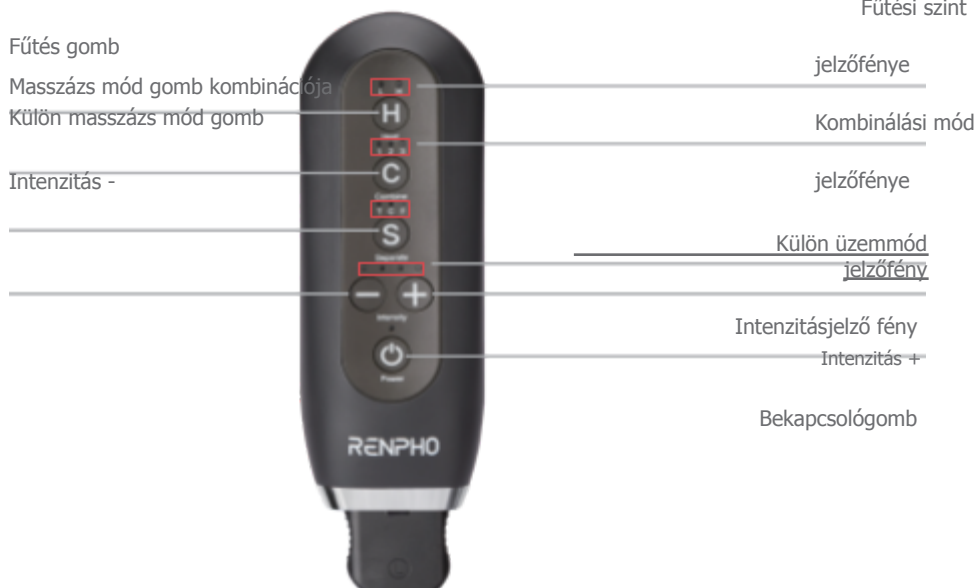

1. **🔥** "Nyomja meg a masszírozó BE-/Kikapcsolásához. Az alapértelmezett mód az 1-es mód, a 2-es intenzitás és a magas hőfok kombinációja (folyamatos zöld jelzőfény világít).
2. **H** "Nyomja meg ezt a gombot az alacsony hőfok (L), a magas hőfok (H) vagy a fűtés nélküli üzemmód kiválasztásához. Melegítendő terület: vádli és lábfej.
3. **C** "Nyomja meg ezt a gombot a következő módok kiválasztásához:
  - C1: Masszírozza meg a lábfejét, a vádliját és a combját.
  - C2: Masszírozza együtt a lábfejeit és a vádlijait. A combszorítók légtömlője ebben az üzemmódban leválasztható.
  - C3: Ciklikusan masszírozza a lábfejét, vádliját és combját. A gomb újbóli megnyomásával kikapcsol.
4. **S** "Nyomja meg a combok, a vádlik és a lábfejek külön-külön történő masszírozásához." T: Csak a combok masszírozása  
C: Csak a vádlik masszírozása F: Csak a lábfej masszírozása

A gomb újbóli megnyomásával kikapcsol.

5. „ Nyomja meg a gombot a levegő intenzitási szintjének növeléséhez. „ ”  
Nyomja meg a gombot a levegő intenzitási szintjének csökkentéséhez.

4 intenzitási szint közül választhat. Az intenzitás gomb nem működik, ha kikapcsolja a kombinált vagy a különálló módot.

Jegyzet:

- 1) A masszírozó 20 percenként automatikusan kikapcsol. Nyomja meg ismét a bekapcsológombot a masszírozó használatának folytatásához.
- 2) A masszírozó memória funkcióval van programozva, és bekapcsoláskor automatikusan az utolsó üzemmódban, hő- és intenzitásbeállításon működik. Az üzemmód váltásakor a hő- és intenzitásszint nem változik. A memória funkció nem működik, ha kikapcsolja a termék áramellátását.
- 3) A combszorítók levehetőek. Ne válassza az 1-es, 3-as vagy a T módot a szétválasztásnál, ha a combszorítók le vannak választva.
- 4) A masszírozó készenléti üzemmódba lép, és a zöld tápellátásjelző villogni kezd, ha egyszerre kikapcsolja a fűtést és az üzemmódot, és 10 másodpercig nem működteteti a vezérlőt.

## Biztonsági G karbantartás

### 1. Tisztítási módszer



- Ne mossa mosógépben. Ne merítse semmilyen folyadékba tisztításhoz. Ne tisztítsa súrolószerekkel, kefékkel, benzinnel, kerozinnal, üvegpolírozóval vagy festékhígítóval. Javasoljuk, hogy a masszírozót puha, enyhén nedves ruhával törölje át.

### 2. Csomagolási módszer

Csomagolás közben kerülje a csatlakozócső összehajtását, különben felfújás hibát okozhat.

# Hibaelhárítás

| PROBLÉMA                                                                | OK                                                                                                                                             | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A termék nem működik                                                    | Nincs csatlakoztatva a tápkábel, vagy a csatlakozódugó laza.<br>Eltérő specifikációjú adapter használata (A tápellátásjelző lámpa nem működik) | Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt<br>Kizárólag a csomagban található adaptert használja                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | A főkapcsoló nincs bekapcsolva, vagy az automatikus kikapcsolás időzítője kikapcsolja (a tápellátás jelzőfényen zölden villog)                 | Kapcsolja be a főkapcsolót                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Túl erősnek, kényelmetlenül érzem magam, vagy feszes masszírozás közben | A tekercsek túl szorosak                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Válassza a legalacsonyabb intenzitást</li> <li>2. Lazítsa meg a megfelelő alkatrész tépőzáras pántjait</li> <li>3. Nyomja meg a bekapcsológombot a kikapcsoláshoz</li> <li>4. Húzza ki a levegőtömlőt a vezérlőből, a légszák gyorsan leereszt</li> </ol> |
|                                                                         | Az intenzitás túl magasra van állítva                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hirtelen nincs meleg                                                    | Túlmelegedés elleni védelem a hosszú távú használat miatt                                                                                      | Indítsa újra a masszírozót, miután lehűlt                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A vezérlő felforrósodik                                                 | A termék valószínűleg túl régóta használatban van                                                                                              | A TÚLZOTT HASZNÁLAT elkerülése érdekében a masszírozó használatát javasoljuk alkalmanként csak 20-30 percre. Kikapcsolás után hagyja lehűlni a masszírozót, mielőtt újra használná                                                                                                                  |
| Az egyes lábak masszázshintenzitása eltérő, ha egyszerre használják.    | A masszírozó viselése során a tépőzáras pántok meghúzásakor hagyott rés lábanként eltérő lehet.                                                | Próbáljon meg ugyanolyan rést hagyni a masszírozó meghúzásakor.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Van egy légszivárgás                                                    | A levegőtömlők nincsenek megfelelően felszerelve                                                                                               | Kérjük, óvatosan szerelje vissza a levegőtömlőt, ügyelve arra, hogy a tömlő biztonságosan rögzítve legyen.                                                                                                                                                                                          |

## 1. Az áthúzott szemetesekuka szimbólum jelentése

Az áthúzott szemetesekuka szimbólum azt jelenti, hogy törvényileg köteles ezeket a készülékeket a válogatatlan kommunális hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani, azaz a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A nem állandóan beszerelt elemeket vagy újratölthető akkumulátorokat előzőleg el kell távolítani és külön kell ártalmatlanítani.

## 2. Lehetőségek régi készülékek visszavételére

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak tulajdonosai a hulladékgazdálkodási hatóságok által meghatározott és rendelkezésre álló lehetőségek keretein belül visszavihetik vagy összegyűjthetik azokat a megfelelő ártalmatlanítás biztosítása érdekében.

A Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/30/EU irányelvnek, a 2014/35/EU irányelvnek, a 2011/65/EU irányelvnek, a 2016. évi elektromos berendezésekre (biztonság) vonatkozó rendeletnek, a 2016. évi elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó rendeletnek, a 2012. évi egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló rendeletnek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Forgalmazó  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
[www.sunnysoft.hu](http://www.sunnysoft.hu)